

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Codice	ID BD/RDM	UDI-DI di base	
ARBOR DELUXE	1967945/R	805635139ARBORDELUXE57	

Azienda: IMPERIAL S.r.I.

Indirizzo: Via Ciucani 5 - 20876 Ornago (MB)

Prodotti: ARBOR DELUXE - Materasso antidecubito

Classe di rischio: Classe I

È conforme ai seguenti atti legislativi de/l'Unione:

2017 / 745 / UE I dispositivo è assoggettato alla procedura di valutazione di conformità prevista

all'articolo 52, punto 7 del Regolamento 2017 /7 45 /UE.

Ornago, 26/05/2021 Legale Rappresentante
KLAUS DIBIASI

Revisione	Data	Note	
0.0	18/06/2020	Prima edizione	
1.0	26/05/2021	Marcatura CE ai sensi del regolamento 2017/745/UE	

2

DESTINAZIONE D'USO

Il materasso ARBOR DELUXE è destinato alla prevenzione statica del decubito e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio o con lesioni di 3° stadio non esteso (per soggetti di peso inferiore a 110 kg e a seguito di un giudizio clinico). Il dispositivo deve essere utilizzato come da modalità descritte nel presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	RIALTO				
	Lunghezza	Larghezza	Spessore		
Dimensioni di cm	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90 - 120	18		
Composizione					
Lastra portante	Lastra portante: schiuma di lattice 100%				
Maglia di rivestimento	Maglia di rivestimento: 50% PL, 50% CO				
	/ Ioni d'argento				
Rivestimento	Supporto: Maglina 100% PES				
	Imbottitura: Tecnofibra climatica 100% PES.				
Peso materasso in kg	12 - 15				

I materassi possono essere usati come preventivi statici del decubito, con il massimo comfort, da utilizzatori con un peso compreso fino a 110 kg.




DISPOSIZIONE GENERALE

Il materasso è composto da:

- A. Lastra portante in schiuma di lattice 100%;
- B. Maglia di rivestimento protettiva;
- C. Rivestimento esterno in CASHMERE ed ARGENTO.

Il materasso è dotato di sette zone a portanza differenziata che consentono di ottenere un piano di riposo in grado di ridistribuire il peso di un corpo disteso lungo l'intera superficie di contatto attenuando così i picchi di pressione che sono la causa primaria delle piaghe da decubito. Grazie al trattamento antibatterico **Sanitized®** e **Actigard®** che proteggono il materasso da acari, batteri e muffe la protezione igienica è garantita assicurando sempre un sonno sano e riposante.
I trattamenti antibatterici lo rendono particolarmente indicato alle persone allergiche.

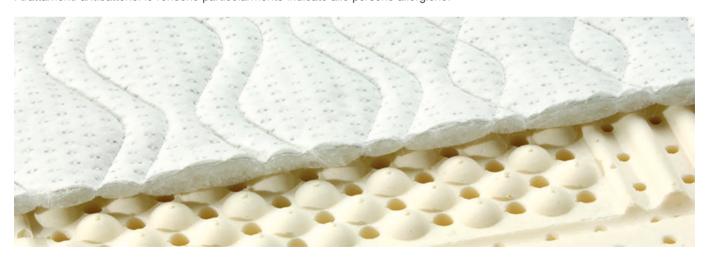





SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Fabbricante



Data di fabbricazione IT: Paese di fabbricazione



Marcatura CE ai sensi del Regolamento 2017/745/UE



Dispositivo medico



Numero di lotto



Identificativo unico del dispositivo



Codice di identificazione articolo



Lavaggio a temp. max 40°C



Non candeggiare



Non asciugare a tamburo



Non stirare



Non lavare a secco



Peso max. paziente

Materasso antidecubito ARBOR DELUXE

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta identificativa cucita sulla fodera del materasso.



FAC SIMILE ETICHETTA

5

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

La piattaforma di sostegno del materasso dovrà essere a doghe in legno e in grado di sostenere il peso dell'utilizzatore e del materasso; il piano di appoggio dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adequata ventilazione.

UTILIZZO



AVVERTENZA! L'utilizzo da parte di persone di peso superiore ai 110kg modifica le prestazioni antidecubito riportate nel presente testo.

Per effettuare la messa in uso del materasso procedere nel modo seguente:

- estrarre il materasso dalla confezione:
- verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del materasso;
- controllare che la cerniera del materasso sia completamente chiusa:
- posizionare il materasso direttamente sul piano rete.

AVVERTENZE PER L'USO



AVVERTENZA! Evitare una postura fissa.



AVVERTENZA! L'utilizzo del materasso in condizioni di lesioni alla cute di 1° - 2° stadio o con lesioni di 3° stadio non esteso deve essere eseguito a seguito di giudizio clinico ed eseguito sotto controllo medico.

LAVAGGIO DEL RIVESTIMENTO

Lavare il rivestimento del materasso usando una piccola dose di detersivo per delicati. Non centrifugare, non asciugare con asciugatrici ma asciugare esponendo all'ombra in luogo ventilato.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi, ma esclusivamente acqua tiepida asciugando bene la zona a bassa temperatura subito dopo il lavaggio.

MANUTENZIONE

Per prolungare la vita del materasso ed evitare deformazioni permanenti è necessario eseguire una rotazione testa/piedi e sotto/sopra ad ogni cambio lenzuola, come minimo ogni 7 giorni.

Materasso antidecubito ARBOR DELUXE

6





GARANZIA

Garanzia anni 15 alle condizioni riportate sul contratto di vendita.

Questo materasso è assolutamente garantito esente da qualsiasi difetto sia di produzione che dei materiali.

Il lattice 100% può presentare piccole imperfezioni come: piccole macchie, leggere abrasioni, modeste infossature, bordi non perfettamente regolari, piccoli tagli o piccole sfogliature. Ciò non fa assolutamente venire meno l'alta qualità del prodotto e soprattutto non altera la sua funzionalità.

Eventuali imperfezioni del tessuto, piccoli strappi, mancanze di cuciture che non pregiudicano la funzionalità del materasso, devono essere contestati al momento della consegna.

Il materasso in lattice è soggetto ad assestamento nel tempo, sono pertanto da ritenersi normali piccoli avvallamenti nell'ordine massimo di 1 cm, come pure variazioni nelle misure di: larghezza, lunghezza (± 2%).

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia i difetti provocati da: riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi dal medesimo incaricati, errata manipolazione, uso eccessivo della forza, sovraccarichi esagerati e non conformi alle norme, anomalie del tessuto o della fodera derivanti dal normale uso del materasso.

L'Azienda si riserva il diritto di far ispezionare da un suo incaricato il materasso per verificarne lo stato d'uso e l'eventuale difetto. La Garanzia è prestata alle condizioni e norme riportate sul contratto.

La Garanzia non si estende in nessun caso al risarcimento danni di qualsiasi natura, né a rimborso spese di manodopera, di materiali o altro, non preventivamente autorizzato da IMPERIAL S.r.I.

La Garanzia decorre dalla data di acquisto della quale fa fede il documento fiscale.









20876 Ornago MB - Via A. Ciucani 5 - Tel. +39 0461 662002 - Fax +39 0461 6625158 info@imperial-life.com - **www.imperial-life.com**

manuale materasso - 03.indd 8 14/05/21 15: