



EVO EXPERIENCE

RETE MANUALE E MOTORIZZATA ANTIDECUBITO



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Istruzioni originali



SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	3	FUNZIONAMENTO ED USO.....	13
Presentazione del Manuale	3	Avvertenze per l'uso	13
Convenzioni	3	Alzare ed abbassare la sezione schienale	13
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	4	Mod. GOLD	13
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE	5	Mod. SILVER	14
SICUREZZA	5	Mod. WHITE	15
Disposizioni di carattere generale	5	Alzare ed abbassare la sezione delle gambe	16
INTRODUZIONE	6	Mod. GOLD	16
Presentazione tecnica generale	6	Mod. SILVER e WHITE	17
Identificazione	7	Movimentazione simultanea sezione schienale	
Destinazione d'uso	7	e sezione superiore delle gambe	
DESCRIZIONE GENERALE	8	(solo su modello GOLD)	18
Denominazione delle parti	8	Abbassamento di emergenza	
Caratteristiche tecniche	10	(solo per modelli elettrici GOLD e SILVER)	19
INSTALLAZIONE	11	Regolazione rigidità doghe	20
Trasporto e movimentazione	11	MANUTENZIONE	21
Preparazione dell'area di installazione	11	Manutenzione ordinaria	21
Controllo alla consegna	11	Pulizia	21
Verifica della dotazione	12	Stoccaggio	21
Allacciamento elettrico	12	Accantonamento	22
Test funzionale	12	Rottamazione	22
		Condizioni di garanzia	22



DISPOSIZIONI GENERALI

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'installazione, il buon uso e la normale manutenzione del letto elettrico prodotto da IMPERIAL SRL. Quanto riportato di seguito non costituisce una descrizione completa dei vari organi dell'attrezzatura e nemmeno un'esposizione dettagliata del suo funzionamento.

L'utilizzatore però troverà qui contenuto quanto è utile conoscere per l'uso in sicurezza e per una buona conservazione del DISPOSITIVO. Si raccomanda prima di iniziare ad operare con il letto, di leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso contenute nel presente libretto. Dal rispetto e dall'esatta osservanza delle istruzioni qui descritte, dipende la sicurezza dell'utilizzatore e il regolare funzionamento.

CONVENZIONI

In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli grafici:

-  **ATTENZIONE!** È posto prima di determinate procedure. La sua inosservanza può provocare danni all'articolo.
-  **AVVERTENZA!** È posto prima di determinate procedure. La sua inosservanza può provocare danni all'operatore e all'articolo.

SICUREZZA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'utilizzatore deve leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e manutenzione della rete.

Utilizzare ed eseguire la manutenzione del dispositivo solo come prescritto nel presente manuale e servirsi esclusivamente di parti di ricambio ed assistenza del fabbricante.

Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale.

Trasferirlo insieme al prodotto in caso di vendita o passaggio a nuovi utilizzatori.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Azienda: IMPERIAL S.r.l.
Indirizzo: Via Ciucani 5 - 20876 Ornago (MB)
Dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il/i dispositivo/i

Nome prodotto	Modello	ID BD/RDM	UDI-DI di base
EVO EXPERIENCE WHITE	Rete antidecubito	1967994/R	805635139EVOEXWHITERS
EVO EXPERIENCE SILVER	Rete elettrica antidecubito	1967997/R	805635139EVOEXSILVERRX
EVO EXPERIENCE GOLD	Rete elettrica antidecubito	1967998/R	805635139EVOEXGOLDUJ

Destinazione d'uso:

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per:

- prevenzione statica di lesioni da decubito
- consentire a persone con limitate capacità motorie di raggiungere una posizione tale da potersi alimentare correttamente.

Ambiente d'uso: uso domestico.

Il dispositivo non può essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva. Personale destinato all'uso del dispositivo: soggetti invalidi, soggetti con difficoltà motorie, soggetti affetti da condizioni gravi che obbligano alla degenza. La funzione antidecubito è stata verificata con il materasso ARBOR DELUXE di IMPERIAL ed è garantita solo utilizzando materassi con caratteristiche equivalenti. Non sono garantite le prestazioni della rete utilizzando materassi differenti.

Classe di rischio: Classe I



È CONFORME AI SEGUENTI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE:

- 2017/745/UE Regolamento (UE) 2017 /745 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
- 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- 2014/35/UE Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- 2014/30/UE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- 2011/65/UE Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ornago, 26/05/2021

Legale Rappresentante
KLAUS DIBIASI

Revisione	Data	Note
0.0	18/06/2020	Prima edizione
1.0	26/05/2021	Marcatura CE ai sensi del regolamento 2017/745/UE




INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE TECNICA GENERALE

In faggio multistrato, dotato di 23 doghe molleggianti ed equilibranti e di 8 piattelli abbassamento spalla (nella misura 80x190 cm) per aumentare il comfort di spalle e dorso. Le doghe centrali sono dotate di cursori che ne regolano la rigidità in modo da favorire il massimo comfort all'utilizzatore.

MODELLO GOLD

Sezione schienale e sezione superiore delle gambe comandate elettricamente tramite pulsantiera a filo spiralato. Sezione inferiore delle gambe vincolata a quella superiore: nella fase di sollevamento della sezione superiore si alza automaticamente anche la sezione inferiore impedendo così la rotazione negativa del ginocchio.

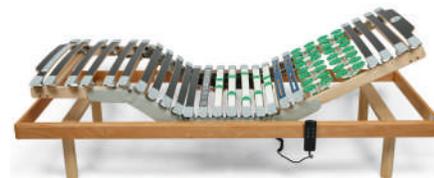

MODELLO SILVER

Sezione schienale comandata elettricamente tramite pulsantiera a filo spiralato. Sezione gambale regolabile manualmente.



MODELLO WHITE

Sezione schienale e sezione superiore delle gambe a regolazione manuale.





IDENTIFICAZIONE

L'articolo è identificabile dalla targhetta, posta sull'articolo, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Nome e indirizzo del fabbricante;
- Marchio CE;
- Nome articolo;
- Numero lotto;
- Data di fabbricazione;
- Portata massima.

	IMPERIAL SRL VIA CIUCANI 5 20876 ORNAGO (MB)					18/01/2017
	= 100kg	EVO EXPERIENCE FULL MOTION 79X188				
	= 120kg	motore t/p				

I dati elettrici sono riportati nella etichetta applicata sull'alimentatore del letto:

- Classe di protezione elettrica;
- Tipo di funzionamento;
- Grado di protezione elettrica;
- Tensione, frequenza e corrente di alimentazione;
- Rifiuto speciale.



DESTINAZIONE D'USO

La rete EVO EXPERIENCE è indicata nei casi di lunga degenza al fine di rendere uniformi le pressioni nei punti di appoggio del corpo limitando i rischi di occlusione capillare prolungata. La funzione antidecubito è stata testata con il materasso DELUXE di Imperial Life;


Rete manuale e motorizzata antidecubito **EVO EXPERIENCE**



DESCRIZIONE GENERALE

DENOMINAZIONE DELLE PARTI

1. Sezione schienale;
2. Piattelli abbassamento spalla;
3. Sezione bacino;
4. Regolatori di rigidità doghe;
5. Sezione superiore delle gambe (solo su mod. GOLD);
6. Sezione inferiore delle gambe;
7. Gambe del letto;
8. Pulsantiera (solo su mod. GOLD e SILVER).

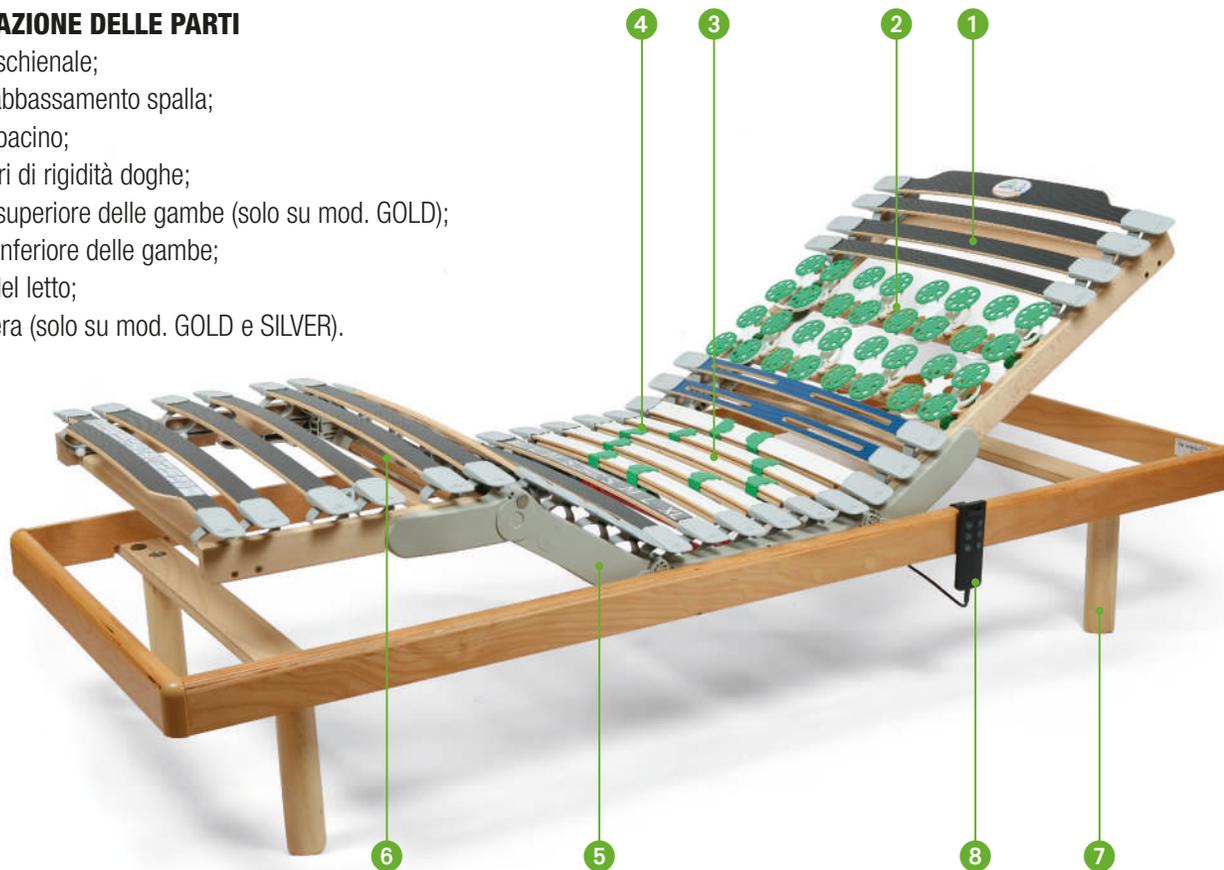



PULSANTIERA RETE MOD. GOLD

- 8a** Sollevare la sezione schienale;
- 8b** Abbassare la sezione schienale;
- 8c** Sollevare la sezione superiore delle gambe;
- 8d** Abbassare la sezione superiore delle gambe;
- 8e** Sollevare simultaneamente la sezione schienale e la sezione superiore delle gambe;
- 8f** Abbassare simultaneamente la sezione schienale e la sezione superiore delle gambe.



Spegnere / accendere la luce notturna
Premere contemporaneamente **8e** e **8f**
(solo telecomando wireless)


PULSANTIERA RETE MOD. SILVER

- 8g** Sollevare la sezione schienale;
- 8h** Abbassare la sezione schienale.

telecomando a filo



telecomando wireless

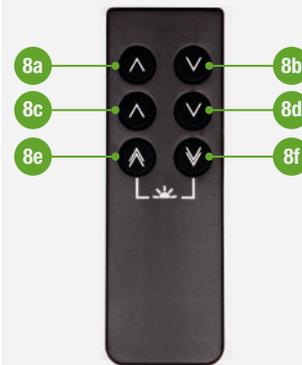

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI		GOLD	SILVER	WHITE
Sezioni	n°	4	2	2
Dimensioni di ingombro	mm	1900/2000 x 800/1800		
Regolazione sezione schienale	deg	0 - 65		
Regolazione sezione superiore delle gambe	deg	0 - 40	0 - 15	0 - 15
Carico di lavoro sicuro (rete singola)	kg	120		
Peso	kg	30	26	25

*Si definisce CARICO DI LAVORO la somma di quanto segue: paziente (100 kg) e materasso (20 kg)

MODELLI		GOLD	SILVER
Tensione di alimentazione	V	100 - 240	
Frequenza di rete	Hz	50/60	
Corrente Max assorbita	VA	250	
Classe di protezione elettrica		III	
Grado di protezione elettrica	IP	20	
Funzionamento intermittente	min/min	2 pausa 10	



INSTALLAZIONE

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

 **AVVERTENZA!** Le operazioni di sollevamento e movimentazione devono essere condotte da personale specializzato e addestrato a questo tipo di manovre.

Il trasporto può essere effettuato attraverso le seguenti vie di comunicazione: stradale, ferroviaria, marittima, aerea.

Il peso dell'articolo è deducibile dalle caratteristiche tecniche e dall'imballo. La movimentazione del singolo articolo deve essere effettuata utilizzando mezzi idonei alla movimentazione quali il carrello elevatore semovente o il carrello elevatore manuale.

Restano valide le accortezze per la sicurezza sul lavoro.

PREPARAZIONE DELL'AREA DI INSTALLAZIONE

 **ATTENZIONE!** Non esporre il prodotto alle intemperie.

 **ATTENZIONE!** Evitare di alloggiare il prodotto in ambienti con temperature superiori ai 45°C e comunque non avvicinarlo a fonti di calore.

Il luogo di installazione deve disporre di un pavimento rigido, orizzontale, piano.

CONTROLLO ALLA CONSEGNA

Rimuovere i componenti d'imballaggio e controllare l'articolo.

Se tutti i componenti sono integri, il nylon e il resto dell'imballaggio possono essere destinati al riciclaggio in appositi luoghi di raccolta inaccessibili a bambini e ad animali.

Se l'articolo è stato danneggiato durante il trasporto, trattenere il nylon e il resto dell'imballaggio e contattare il fabbricante entro 48 ore dalla consegna.

Trasferirlo insieme al prodotto in caso di vendita o passaggio a nuovi utilizzatori.

Rete manuale e motorizzata antidecubito **EVO EXPERIENCE**



VERIFICA DELLA DOTAZIONE

! *AVVERTENZA! Eventuali odori emessi dal prodotto appena estratto dall'imballo sono da ritenersi nella norma e cessano dopo l'esposizione del prodotto all'aria.*

L'imballo contiene:

- rete elettrica antidecubito (mod. ordinato);
- manuale di istruzioni per l'uso.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

! *AVVERTENZA! I piani letto non possono essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva o infiammabile.*

! *ATTENZIONE! I cavi devono essere posizionati in modo da non essere schiacciati, intrappolati, tesi, calpestati, piegati, bagnati o essere di intralcio rispetto alle parti mobili.*

! *AVVERTENZA! Il cavo di alimentazione non dovrà arrecare intralcio all'utilizzatore.*

! *AVVERTENZA! Verificare che la tensione e la frequenza di rete corrispondano a quella cui è stato predisposto l'articolo (vedi targhetta di identificazione).*

Per procedere all'allacciamento elettrico predisporre di una presa collegare la spina alla rete di alimentazione.

TEST FUNZIONALE

! *ATTENZIONE! Il seguente controllo deve essere ripetuto periodicamente per verificare l'efficienza del prodotto, come specificato nel capitolo "Manutenzione".*

Verificare se il prodotto funziona correttamente facendo riferimento al capitolo "Funzionamento e uso" del presente manuale.

Se il controllo dà esito positivo l'articolo è pronto per essere messa in regolare servizio, in caso contrario contattare immediatamente il Servizio Assistenza Clienti Imperial SRL.



FUNZIONAMENTO ED USO

AVVERTENZE PER L'USO

- ⚠ *È vietato sedersi alle estremità delle sezioni quando queste sono alzate.*
- ⚠ *Il letto non è adatto ad essere impiegato in atmosfere potenzialmente esplosive.*
- ⚠ *Non usare il letto per scopi diversi da quelli a cui è stato destinato e per cui è stato progettato.*

ALZARE ED ABBASSARE LA SEZIONE SCHIENALE

Rimuovere i componenti d'imballaggio e controllare l'articolo.

- ⚠ **AVVERTENZA!** *Non inserire le mani o oggetti tra la sezione schienale e il basamento. Non intervenire manualmente sulle parti mobili ed attenersi alle istruzioni.*

MOD. GOLD

Per alzare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8a** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.

Per abbassare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8b** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.



Rete manuale e motorizzata antidecubito **EVO EXPERIENCE**



MOD. SILVER

Per alzare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8g** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.

Per abbassare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8h** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.





MOD. WHITE

La regolazione della sezione schienale del letto mod. WHITE è ottenuta manualmente grazie a un meccanismo a cremagliera. Vi è la possibilità di applicare due pistoni a gas, per l'utilizzo come letto-contenitore.

-  **AVVERTENZA!** Non inserire le mani o oggetti tra la sezione schienale e il basamento. Non intervenire manualmente sulle parti mobili ed attenersi alle istruzioni.
-  **AVVERTENZA!** La regolazione della sezione schienale deve essere fatta a letto vuoto.
-  **AVVERTENZA!** Non rilasciare la sezione schienale se non si è certi del perfetto bloccaggio della sezione da parte del meccanismo di bloccaggio.

Per alzare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- portarsi dietro o a lato della sezione schienale;
- impugnare con una mano la maniglia (9) e accompagnare il movimento di salita fino al raggiungimento della posizione desiderata. Il meccanismo a cremagliera permette 6 diverse regolazioni.

Per abbassare la sezione schienale procedere nel modo seguente:

- portarsi dietro o a lato della sezione schienale;
- impugnare con entrambe le mani la sezione schienale, sollevarla completamente in modo da sbloccare il meccanismo a cremagliera e abbassare la sezione fino al completo appoggio nel piano rete.



Rete manuale e motorizzata antidecubito **EVO EXPERIENCE**



ALZARE ED ABBASSARE LA SEZIONE DELLE GAMBE

MOD. GOLD

La regolazione della sezione schienale del letto è ottenuta tramite un attuatore elettrico comandato da pulsantiera.

⚠ AVVERTENZA! *Non inserire le mani o oggetti tra la sezione delle gambe e il basamento.
Non intervenire manualmente sulle parti mobili ed attenersi alle istruzioni.*

Per alzare la sezione delle gambe procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8c** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.

Per abbassare la sezione delle gambe procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8d** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.





MOD. SILVER E WHITE

La regolazione della sezione delle gambe del letto è ottenuta manualmente grazie a un meccanismo a cremagliera. Vi è la possibilità di applicare due pistoncini a gas per il sollevamento totale della sezione.

-  **AVVERTENZA!** Non inserire le mani o oggetti tra la sezione schienale e il basamento. Non intervenire manualmente sulle parti mobili ed attenersi alle istruzioni.
-  **AVVERTENZA!** La regolazione della sezione schienale deve essere fatta a letto vuoto.
-  **AVVERTENZA!** Non rilasciare la sezione schienale se non si è certi del perfetto bloccaggio della sezione da parte del meccanismo di bloccaggio.

Per alzare la sezione delle gambe procedere nel modo seguente:

- portarsi dietro o a lato della sezione gambale;
- impugnare con una mano la maniglia **(10)** e accompagnare il movimento di salita fino al raggiungimento della posizione desiderata. Il meccanismo a cremagliera permette 3 diverse regolazioni.

Per abbassare la sezione delle gambe procedere nel modo seguente:

- portarsi ai piedi del letto;
- afferrare la sezione delle gambe tramite la maniglia (10) e sollevarla completamente, in modo da sbloccare il meccanismo a cremagliera;
- abbassare la sezione delle gambe fino all'appoggio completo sul telaio del piano rete.



Rete manuale e motorizzata antidecubito **EVO EXPERIENCE**



MOVIMENTAZIONE SIMULTANEA SEZIONE SCHIENALE E SEZIONE SUPERIORE DELLE GAMBE (SOLO SU MODELLO GOLD)

La sezione schienale e la sezione superiore delle gambe sono regolabili simultaneamente tramite due attuatori elettrici comandati da pulsantiera.

! AVVERTENZA! *Non inserire le mani o oggetti tra le sezioni e il basamento. Non intervenire manualmente sulle parti mobili ed attenersi alle istruzioni.*

Per alzare simultaneamente la sezione schienale e la sezione superiore delle gambe procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8e** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.

Per abbassare simultaneamente la sezione schienale e la sezione superiore delle gambe procedere nel modo seguente:

- premere il pulsante **8f** della pulsantiera fino a raggiungere la posizione desiderata.





ABBASSAMENTO DI EMERGENZA (SOLO PER MODELLI ELETTRICI GOLD E SILVER)

Le reti elettriche GOLD e SILVER sono dotate di un sistema che permette di abbassare le sezioni comandate elettricamente in caso di mancanza di corrente.

Per effettuare l'abbassamento di emergenza procedere come segue:

- togliere il materasso e le doghe della parte centrale della rete: troverete due ganci rossi che comandano il rilascio della frizione motore delle due sezioni di schiena e gambe;
- tirare il gancio (senza esercitare troppa forza) verso il centro della rete e tenendolo tirato spingere a mano verso il basso la sezione che si vuole abbassare.

Una volta ripristinata la corrente è possibile agire normalmente con la pulsantiera.

Uno scatto avvisa che la frizione motore è nuovamente agganciata.





REGOLAZIONE RIGIDITÀ DOGHE

⚠ AVVERTENZA! La regolazione della rigidità delle doghe deve essere effettuata a letto vuoto.

La rete è dotata di regolatori per personalizzare il sostegno della zona lombare.

Le doghe regolabili sono evidenziate dal colore bianco con due cursori rossi per dogha: spostandoli verso l'esterno aumenta il sostegno.

È possibile bloccare il molleggio delle doghe facendo scorrere verso l'esterno i cursori fino a farli inserire nei supporti delle doghe.

Lo spostamento dei cursori deve avvenire sempre in modo simmetrico su una stessa dogha.

Es. Il cursore di sinistra si trova in posizione M, anche il cursore di destra dovrà trovarsi in posizione M.





MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

L'utilizzatore deve ispezionare letto almeno due volte all'anno; l'ispezione deve comprendere la ricerca di qualsiasi danno che potrebbe compromettere l'integrità ed il corretto funzionamento del prodotto.

-  **ATTENZIONE!** *Se si individua un danno porre immediatamente fuori servizio il prodotto fino a riparazione o sostituzione avvenuta.*
-  **ATTENZIONE!** *Si consiglia di far effettuare qualsiasi operazione di regolazione tecnica o riparazione dell'articolo non elencata in questo capitolo a personale specializzato del servizio di vendita e di assistenza.*

PULIZIA

Per una migliore e più lunga durata del prodotto è indispensabile eseguire periodicamente un'accurata pulizia generale. Si consiglia di procedere come descritto di seguito.

-  **ATTENZIONE!** *Non spruzzare detersivi direttamente sulle parti meccaniche dell'articolo. Si raccomanda di evitare l'uso di diluenti, alcool o benzina, detersivi e forti abrasivi, quand'anche fosse per eliminare "macchie difficili".*

All'occorrenza o almeno ogni 15 giorni:

- pulire le doghe, il portadoghe e gli elementi del telaio portante del letto utilizzando un panno umido e asciugare completamente;
- pulire con cura le parti meccaniche e gli attuatori elettrici utilizzando un panno morbido; asciugare completamente, e verificare la loro efficienza.

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio per un lungo periodo deve essere effettuato rispettando le seguenti condizioni:

- l'articolo deve essere imballato;
- il luogo di stoccaggio deve essere asciutto e al riparo dal sole;
- non devono essere sovrapposti gli articoli



ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Provvedere ad ingrassare le parti che si potrebbero ossidare o danneggiare in caso di essiccazione.

ROTTAMAZIONE

Allorché si decida di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo.

Valutare la classificazione del bene secondo il grado di smaltimento. Rottamare con rottami di ferro e collocare in centri di raccolta previsti. Se considerato rifiuto speciale, smontare e dividere in parti omogenee, smaltire, quindi, secondo le leggi vigenti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per i quindici anni successivi alla data di acquisto, l'Imperial life s.r.l. rimborsa il costo di sostituzione o di riparazione del prodotto in caso di difetto di fabbricazione o di materiale ed in base alla norma ISO 1856 e ISO 3385 nel seguente modo:

- fino al sesto anno compreso, integrale rimborso del costo;
- dal settimo al quindicesimo anno, parziale rimborso del costo, nel senso che il rimborso diminuisce progressivamente del 10% con il decorrere degli anni: rimborso del 90% il settimo anno, 80% l'ottavo anno, 70% il nono anno, 60% il decimo anno, 50% l'undicesimo anno, 40% il dodicesimo anno, 30% il tredicesimo anno, 20% il quattordicesimo anno, 10% quindicesimo anno.

Il costo per la sostituzione del prodotto già sostituito o per la riparazione del prodotto già riparato, è integralmente rimborsato per i due anni successivi, decorsi i quali il costo è invece parzialmente rimborsato secondo le modalità indicate, che restano calcolate a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Per costo si intende quello indicato nel listino prezzi dell'Imperial life s.r.l..





20876 Ornago MB - Via A. Ciucani 5 - Tel. +39 0461 662002 - Fax +39 0461 6625158

info@imperial-life.com - www.imperial-life.com

