

Il punto più alto
della nostra storia



Materasso

Zenit



CE

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Istruzioni originali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Codice	ID BD/RDM	UDI-DI di base
ZENIT	1967945/R	805635139ARBORDELUXE57

Azienda: IMPERIAL S.r.l.

Indirizzo: Via Ciucani 5 - 20876 Ornago (MB)

Prodotti: ZENIT - Materasso antidecubito

Codice di registrazione al M.S. 1638323/R

Classificazione CND Y033306

I prodotti descritti sopra sono in conformità con:

Documento N°	Titolo	Edizione/Data di emissione
93/42/CEE	Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 e succ. mod. integrazioni, concernente i dispositivi medici	14 giugno 1993

Informazioni aggiuntive: I prodotti rientrano tra quelli disciplinati dalla Direttiva Comunitaria n. 42/1993 in classe I secondo la regola 1 punto III dell'all. IX e sono assoggettati alla procedura prevista all'art. 11 punto 5 della 93/42/CEE e successive modifiche integrazioni (Direttiva 2007/47/CE).

Ornago, 26/05/2021

Legale Rappresentante
KLAUS DIBIASI

Revisione	Data	Note
0.0	18/06/2020	Prima edizione
1.0	26/05/2021	Marcatura CE ai sensi del regolamento 2017/745/UE

DESTINAZIONE D'USO

Il materasso ZENIT è destinato alla prevenzione statica del decubito e può essere impiegato in condizioni di cute integra o in presenza di lesioni di 1° - 2° stadio o con lesioni di 3° stadio non esteso (per soggetti di peso inferiore a 120 kg e a seguito di un giudizio clinico). Il dispositivo deve essere utilizzato come da modalità descritte nel presente manuale.

Per la funzionalità del nostro materasso si consiglia l'impiego della rete Imperial.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	RIALTO		
	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni di cm	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90 - 120	18
Composizione			
Lastra portante	Lastra portante: schiuma di lattice 100%		
Maglia di rivestimento	Maglia di rivestimento: 50% PL, 50% CO		
Rivestimento	Rivestimento esterno: 63% PES, 37% KAS / VIS / Ioni d'argento Supporto: Maglina 100% PES Imbottitura: Tecnofibra climatica 100% PES.		
Peso materasso in kg	12 - 15		

I materassi possono essere usati come preventivi statici del decubito, con il massimo comfort, da utilizzatori con un peso compreso fino a 120 kg .

DISPOSIZIONE GENERALE

Il materasso è composto da:

- A. Lastra portante in schiuma di lattice 100%;
- B. Maglia di rivestimento protettiva;
- C. Rivestimento esterno in misto CASHMERE con trattamento ioni d' ARGENTO.

Il materasso è dotato di sette zone a portanza differenziata che consentono di ottenere un piano di riposo in grado di ridistribuire il peso di un corpo disteso lungo l'intera superficie di contatto attenuando così i picchi di pressione che sono la causa primaria delle piaghe da decubito. Grazie al trattamento agli ioni d'argento che protegge il materasso da acari, batteri e muffe, la protezione igienica è garantita assicurando sempre un sonno sano e riposante.

Il trattamento agli ioni d'argento rende il materasso ZENIT particolarmente indicato alle persone allergiche.



Materasso antidecubito ZENIT

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

-  Fabbricante
-  Data di fabbricazione
IT: Paese di fabbricazione
-  Marcatura CE ai sensi del Regolamento 2017/745/UE
-  Dispositivo medico
-  Numero di lotto
-  Identificativo unico del dispositivo
-  Codice di identificazione articolo
-  Lavaggio a temp. max 40°C
-  Non candeggiare
-  Non asciugare a tamburo
-  Non stirare
-  Non lavare a secco
-  Peso max. paziente

Materasso antidecubito ZENIT

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta identificativa cucita sulla fodera del materasso.


Materasso antidecubito
000 cm x 000 cm

REF ZETIT
LOT XXXXXXXXX
 = XXX kg
 MM/AAAA
IMPERIAL SRL Via Ciucani 5 20876 Ornago (MB)
Tel. 0461 662002
info@imperial-life.com - www.imperial-life.com

UDI Vettore UDI

Struttura interna: 100% lattice
Lavaggio rivestimento
    

MD **CE**

FAC SIMILE ETICHETTA

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

La piattaforma di sostegno del materasso dovrà essere a doghe in legno e in grado di sostenere il peso dell'utilizzatore e del materasso; il piano di appoggio dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adeguata ventilazione.

UTILIZZO

 **AVVERTENZA!** L'utilizzo da parte di persone di peso superiore ai 110kg modifica le prestazioni antidecubito riportate nel presente testo.

Per effettuare la messa in uso del materasso procedere nel modo seguente:

- estrarre il materasso dalla confezione;
- verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del materasso;
- controllare che la cerniera del materasso sia completamente chiusa;
- posizionare il materasso direttamente sul piano rete.

AVVERTENZE PER L'USO

 **AVVERTENZA!** Evitare una postura fissa.

 **AVVERTENZA!** L'utilizzo del materasso in condizioni di lesioni alla cute di 1° - 2° stadio o con lesioni di 3° stadio non esteso deve essere eseguito a seguito di giudizio clinico ed eseguito sotto controllo medico.

LAVAGGIO DEL RIVESTIMENTO

Lavare il rivestimento del materasso usando una piccola dose di detersivo per delicati. Non centrifugare, non asciugare con asciugatrici ma asciugare esponendo all'ombra in luogo ventilato.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi, ma esclusivamente acqua tiepida asciugando bene la zona a bassa temperatura subito dopo il lavaggio.

MANUTENZIONE

Per prolungare la vita del materasso ed evitare deformazioni permanenti è necessario eseguire una rotazione testa/piedi e sotto/sopra ad ogni cambio lenzuola, come minimo ogni 7 giorni.

GARANZIA

Garanzia anni 15 alle condizioni riportate sul contratto di vendita.

Questo materasso è assolutamente garantito esente da qualsiasi difetto sia di produzione che dei materiali.

Il lattice 100% può presentare piccole imperfezioni come: piccole macchie, leggere abrasioni, modeste infossature, bordi non perfettamente regolari, piccoli tagli o piccole sfogliature. Ciò non fa assolutamente venire meno l'alta qualità del prodotto e soprattutto non altera la sua funzionalità.

Il lattice è soggetto a possibili alterazioni di colore e densità dovuta a fattori come:

- temperatura e umidità nella stanza, sudorazione corporea, luce e sole.

Pertanto si consiglia di mantenerlo coperto, di non esporlo al sole, di non usare termocoperte, di arieggiarlo e girarlo ancora più frequentemente in caso di eccessiva sudorazione.

Il materasso in lattice è soggetto ad assestamento nel tempo, sono pertanto da ritenersi normali piccoli avvallamenti nell'ordine massimo di 1 cm, come pure variazioni nelle misure di: larghezza, lunghezza ($\pm 2\%$).

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia i difetti provocati da: riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi dal medesimo incaricati, errata manipolazione, uso eccessivo della forza, sovraccarichi esagerati e non conformi alle norme.

La garanzia è esclusa sul rivestimento esterno del materasso, eventuali imperfezioni del tessuto, piccoli strappi, mancanze di cuciture, cerniere difettose devono essere contestate al momento della consegna.

L'Azienda si riserva il diritto di far ispezionare da un suo incaricato il materasso per verificarne lo stato d'uso e l'eventuale difetto.

La Garanzia è prestata alle condizioni e norme riportate sul contratto.

La Garanzia non si estende in nessun caso al risarcimento danni di qualsiasi natura, né a rimborso spese di manodopera, di materiali o altro, non preventivamente autorizzato da IMPERIAL S.r.l.

La Garanzia decorre dalla data di acquisto della quale fa fede il documento fiscale.



Imperial s.r.l

Via G. Postal, 45 - 38098 S. Michele all'Adige (TN) - Tel. +39 0461 662002
info@imperial-life.com - www.imperial-life.com

 **in f**

